



Korte handleiding

Smartbox

Smartbox


Voor ondersteuning, video tutorials,
webinars en meer informatie bezoek
www.thinksmartbox.com

Welkom bij

Grid 3

Grid 3 geeft u de mogelijkheid te communiceren, de wereld rondom u te leren en te controleren.


Dit boekje helpt u aan de slag te gaan met Grid 3. Eens u gestart bent, vergeet niet de trainingskaarten en video tutorials te raadplegen. Ze helpen u de software nog beter aan uw wensen aan te passen.

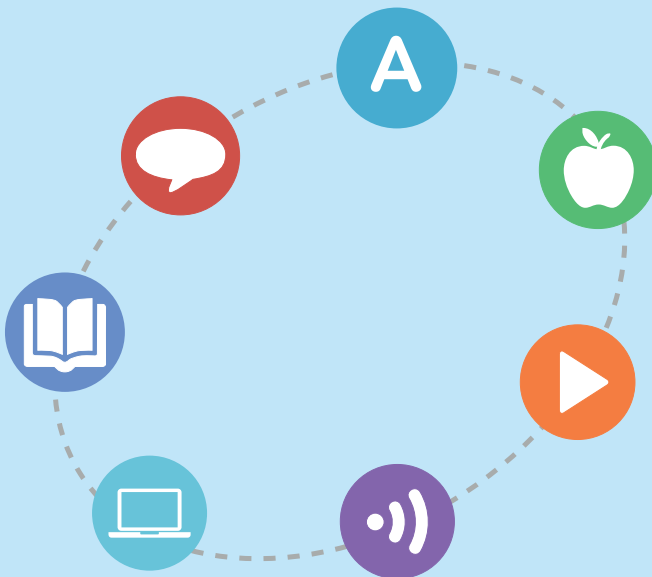

Een gebruiker creëren

Een gebruiker creëren is de eerste stap die u dient te zetten bij het gebruik van Grid 3. Eens de gebruiker gecreëerd is, kunt u de instellingen, paginasets, bedieningsmethode, spraak en nog meer beginnen aan te passen.


De eerste keer dat u het programma opent wordt u gevraagd een gebruiker te creëren.

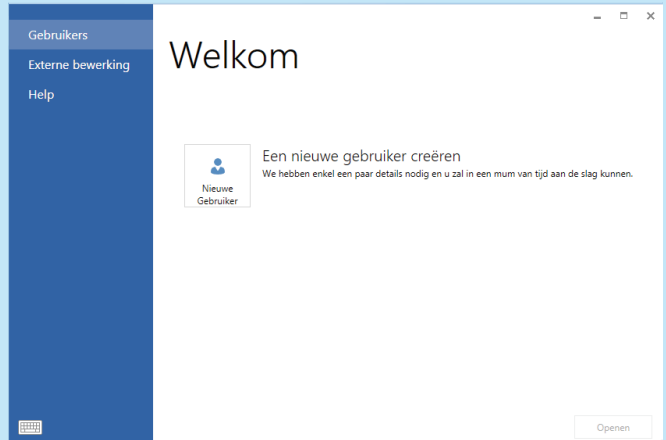

Geef uw gebruiker een naam en selecteer een taal en stem. Indien gewenst, kunt u ook een foto toevoegen.


★ Tip

U kunt de optie **Camera** onder **Foto Veranderen** gebruiken om met de webcam een foto te nemen.

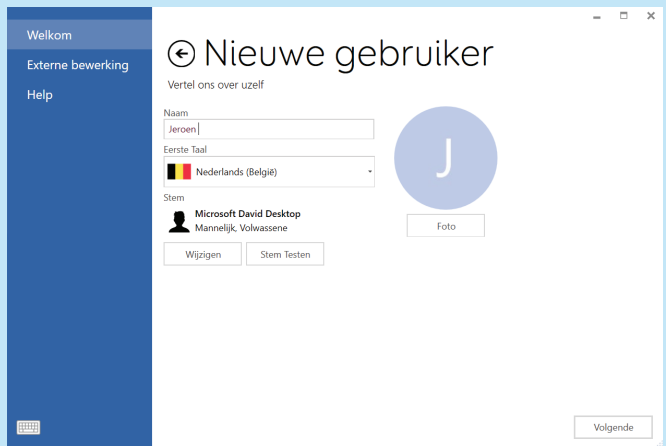

Selecteer uit de zes categorieën bestanden die uw gebruiker nodig heeft.


U kunt later bestanden toevoegen of verwijderen. Maak u dus geen zorgen als u op dit moment niet zeker bent van uw keuze.

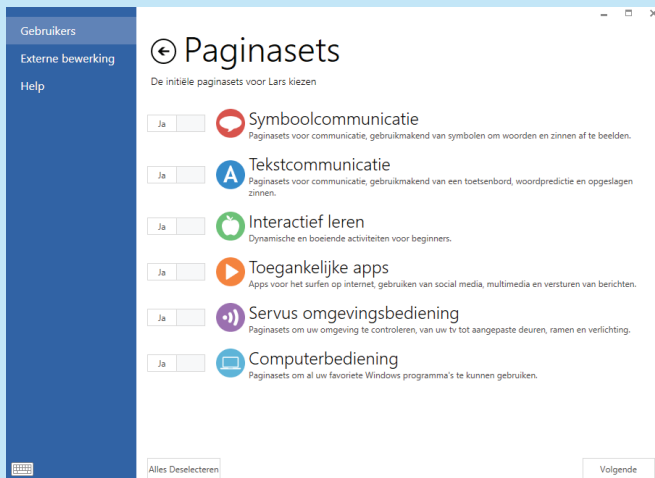

Grid 3 heeft een krachtige woordvoorspelling om de communicatie aanzienlijk te versnellen.

Om gebruik te kunnen maken van deze functie dient u Grid 3 toestemming te geven van uw woorden, zinnen en locatie te leren. U kunt deze instellingen later tijdens het gebruik van Grid 3 wijzigen.

Klik op **Gebruiker Creëren** om het te vlootoien.

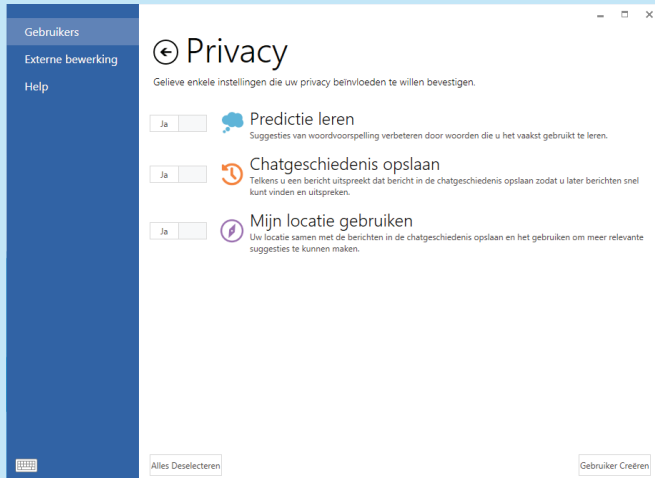

★ Tip

Een gebruiker kan tijdelijk beletten dat informatie over zijn/haar activiteiten opgeslagen wordt door het commando **Privémodus** te gebruiken.



Paginaset

Grid 3 wordt geleverd met een groot aantal kant-en-klare paginaseten. Ze kunnen onmiddellijk gebruikt worden of als basis voor verdere personalisatie dienen.



Symbolcommunicatie

Symbol Chat A is ontworpen voor iemand die pas met alternatieve communicatie begonnen is. Woorden zijn verdeeld in categorieën. In elke categorie kunt u met één of twee selecties eenvoudige zinnen vormen.

Symbol Chat B bouwt voort op de geleerde taal- en bedieningsvaardigheden en bevat een woordenschat om met maximaal drie selecties een zin te vormen.


Symbol Chat C zorgt voor de overgang voor mensen die al succesvol mbv categorieën gecommuniceerd hebben en klaar zijn om meer taalfuncties te gebruiken om meer te kunnen zeggen. In Symbol Chat C bevat elke categorie een kernwoordenschat dat u in staat stelt een grotere waaier van zinnen te vormen.

Symbol Chat D bevat het kernwoordenschat op de Home-pagina. Dit betekent dat u zeer snel mooie zinnen kunt vormen en enkel voor het vinden van minder gebruikelijke woorden naar de categorieën moet gaan. De grammatica hulpmiddelen in Grid 3 helpen u met minder selecties grammaticaal correcte zinnen te vormen.

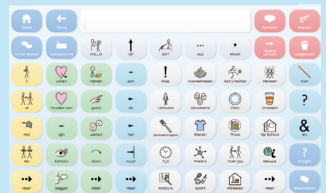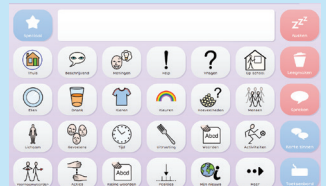


Tekstcommunicatie

Fast Talker 3 is een communicatiebestand voor gebruikers die kunnen lezen en schrijven. Op de Home-pagina kunt u kiezen of u wilt chatten of een toegankelijke app wilt openen zoals sms, telefoon, e-mail, social media, muziek en veel meer.

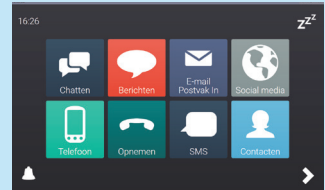

Fast Talker 3 maakt gebruik van de krachtige woordvoorspelling en chatgeschiedenis functies van Grid 3 om de communicatiesnelheid aanzienlijk te verhogen.

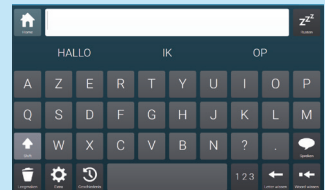

Text Talker is een tekstgebaseerd communicatiesysteem voor gebruikers die kunnen lezen en schrijven. Het omvat woordvoorspelling en een gebruiksklare databank van berichten.



Paginaset


Interactief leren

Interactief leren is een totaal nieuwe manier om te leren en te verkennen. Elke activiteit is ontworpen om spelenderwijs te leren en stappen te zetten richting alternatieve communicatie. Voor elk van de motiverende activiteiten is een pagina ontworpen om over de activiteit en de prestaties te kunnen praten. Kies uit 25 activiteiten die in vier sleutel leerdomeinen verdeeld zijn.


Oorzaak en gevolg activiteiten omvatten interacties met Dilbert de Hond, spelen op een toverpiano en de mogelijkheid om je eigen vuurwerk te maken.



Keuzes laten u toe om met een selectie van activiteiten creatief bezig te zijn – van een modeontwerper worden tot bakken van een gekke taart of bouwen van uw eigen sportauto.

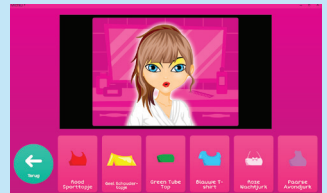


Uitdagingen maken gebruik van de vaardigheden die op andere domeinen geleerd zijn. U kunt met een auto racen, Vier op een rij spleen of op een avontuur vol acties gaan met de Robo Slak!

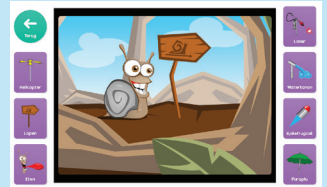

Visuele scènes bieden motiverende en dynamische activiteiten die een grote hulp zijn bij het leren van de taal, lezen en schrijven.



Toegankelijke apps

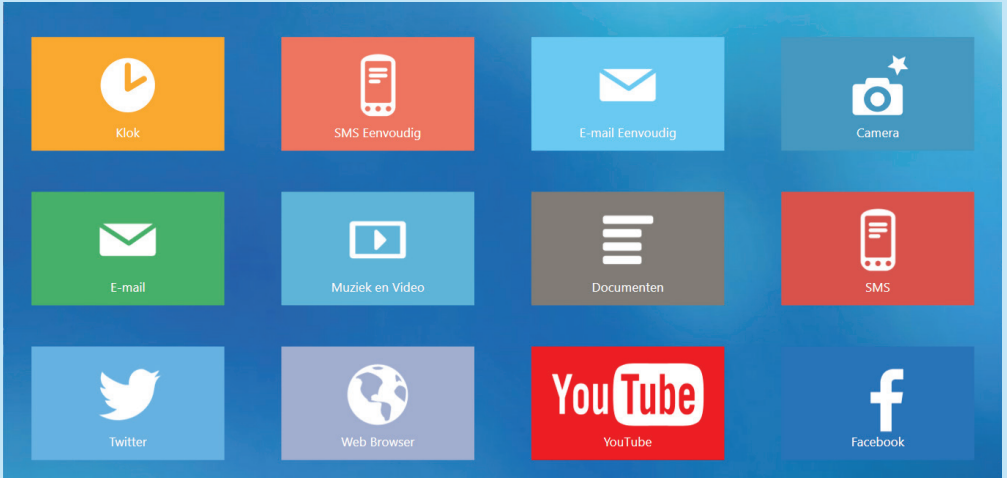

Grid 3 komt met veel gebruiksklare paginasets voor muziek te beluisteren, fotograferen, sms'en, surfen op internet, social media, e-mailen, telefoneren, tekstverwerking en nog meer.

Social media en het internet

Verzend berichten en verken de social media met de Twitter en Facebook paginasets. Verzend snel en makkelijk updates en tweets.

De ingebouwde webbrowser is gebaseerd op de nieuwste technologieën en maakt het gebruiken van de websites intuïtief. Links die op een website voorkomen, kunnen automatisch in cellen geplaatst worden die zelfs met scanning geactiveerd kunnen worden.



Paginasetts

Communicatie op afstand

Commando's voor het verzenden van sms'jes en controleren van een smartphone maken u mobiel. Voor een snellere herkenning kunnen tekstberichten met symbolen ondersteund worden.

Verzend en ontvang e-mails om met je familie en vrienden in contact te blijven. Bladeren door uw postvak, opstellen en verzenden van een e-mail is makkelijk.

Muziek, foto's en video's




Blader door uw mediabestanden vlotjes met de muziek-, foto- en video-paginasetts.

Vind een liedje snel door makkelijk door uw bibliotheek op album, artiest of nummer te bladeren. Video's kunnen makkelijk gecategoriseerd en bekeken worden. Grid 3 bevat een gebruiksvriendelijke Youtube app.

De camera- en fotoalbum-paginasetts stellen u in staat foto's te nemen en ze met de wereld te delen.


★ Tip

U kunt makkelijk pagina's uit een Toegankelijke app aan een bestaande paginaset toevoegen. In **Bewerken-Modus** klik op het tabblad **Paginaset** en dan op **Vanuit een andere paginaset toevoegen**.

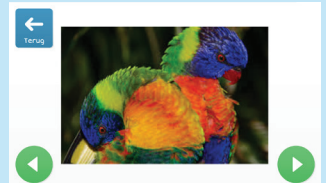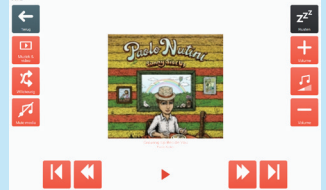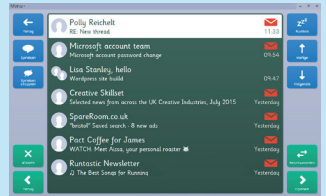

Servus omgevingsbediening

Omgevingsbediening van Grid 3 stelt u in staat om via uw PC alles te controleren, van verlichting tot de voordeur van uw huis. Dit omvat ook alle toestellen die een infrarood afstandsbediening hebben zoals uw TV of Hi-Fi.

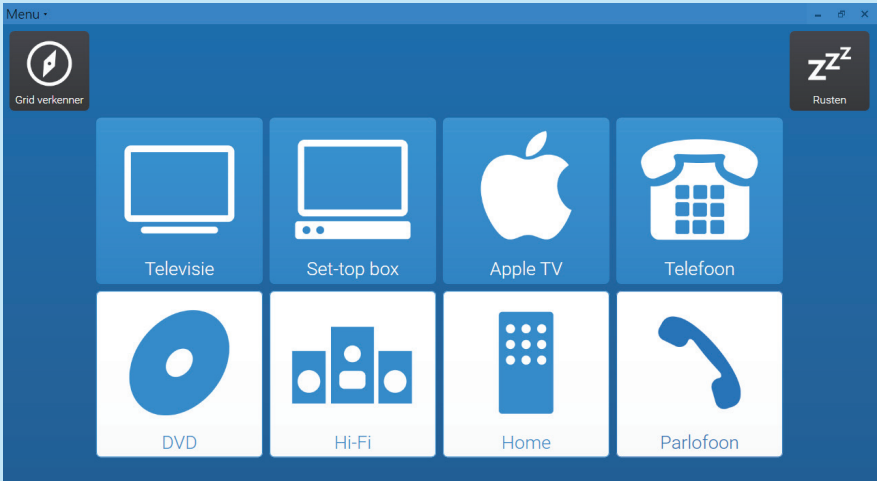

Twee paginasets zijn inbegrepen – een uitgebreide en een eenvoudigere voor degenen die pas met de omgevingsbediening begonnen zijn.

Het eenvoudige en toch duidelijke ontwerp van de Servus-paginasets maakt het navigeren en selecteren van functies makkelijk en intuïtief.



Paginaset

Computerbediening



Computerbediening in Grid 3 geeft u de volledige controle over uw computer met alle nodige middelen om de computer via oogbesturing, aanwijzers of knopjes te bedienen. Er zijn paginasetten om elke applicatie te kunnen bedienen, thuis, op school of op werk.

Twee paginasetten voor computerbediening zijn beschikbaar – een voor bediening via aanwijzers (geoptimaliseerd voor oogbesturing- of hoofdmuisgebruikers), en een voor drukknopgebruikers.

Aanwijzergebruikers kunnen een van de **klikcellen** kiezen en dan naar ergens op het scherm kijken om met hoge nauwkeurigheid te **zoomen en klikken**.

Voor de drukknopgebruikers is een groot aantal commando's voorhanden om de computer volledig te kunnen bedienen.



Het schermtoetsenbord kan in gelijk welk Windows-programma gebruikt worden zoals webbrowsers, Microsoft Office en meer.

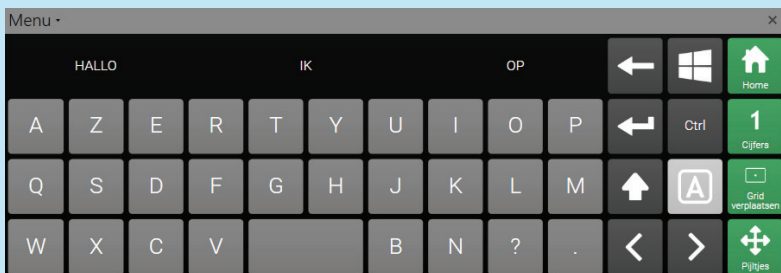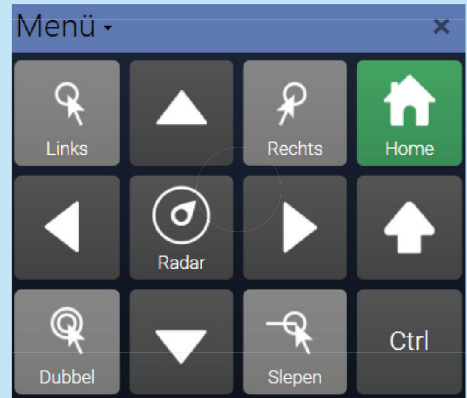

Bezoek [Online Grids](#) voor meer gebruiksklare paginasetten.


Grid Verkenner is uw instrumentenbord om de paginasets te beheren en te laden. Met gelijk welke geselecteerde bedieningsmethode is de Grid Verkenner volledig toegankelijk voor de gebruiker.

Klik op de menubalk van de Grid Verkenner om de beschikbare opties zichtbaar te maken.

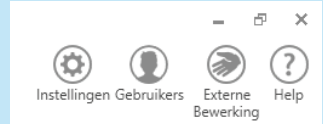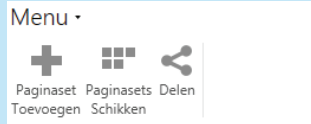

Paginasets schikken

U kunt de volgorde waarin de paginasets op het scherm verschijnen wijzigen door in het menu **Paginasets Schikken** te selecteren.

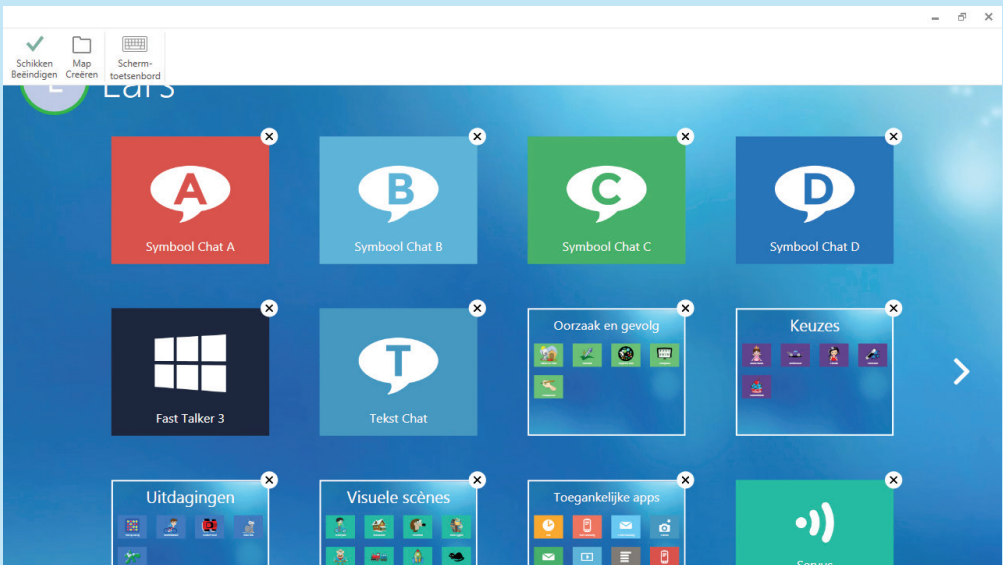


Sleep uw paginasets naar de juiste plaats om ze te herschikken, of creëer mappen om ze daarin te plaatsen. Als uw paginasets op meer dan een pagina staan, kunt u swipen of op de pijltjes aan de rand van het scherm klikken. Wanneer de herschikking gedaan is, klik op **Schikken Beëindigen**.

Grid Verkenner


Paginasetsets toevoegen

U kunt snel een nieuwe paginaset toevoegen door op de menubalk en dan **Paginaset Toevoegen** te klikken.

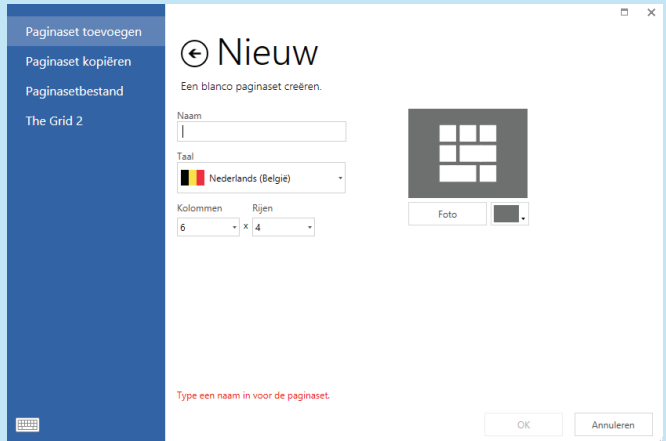

Instellingen

Klik op de menubalk en dan op **Instellingen**. Hier kunt u de instellingen voor de huidige gebruiker aanpassen, zoals bedieningsmethode, spraak en omgevingsbediening (Zie **Les 3** op de trainingskaarten voor meer informatie).

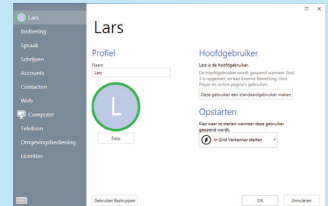


★ Tip

Deze instellingen zijn van toepassing op elke paginaset de huidige gebruiker opent. Dit betekent dat u de instellingen maar een keer moet optimaliseren. Ze kunnen dan in zoveel paginasetsets als u wenst gebruikt worden.

Gebruikers


U kunt switchen tussen gebruikers of nieuwe gebruikers creëren door in Grid Verkenner op de menubalk te klikken en dan **Gebruikers** te selecteren.

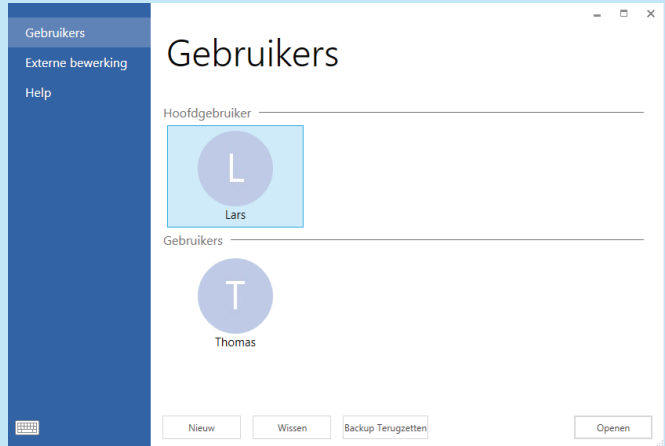

Externe Bewerking

De Externe Bewerking laat een andere Grid 3 gebruiker toe uw paginasets online te bewerken.


Klik op de menubalk en dan op **Externe Bewerking** (Zie **Les 2.8** voor meer informatie).

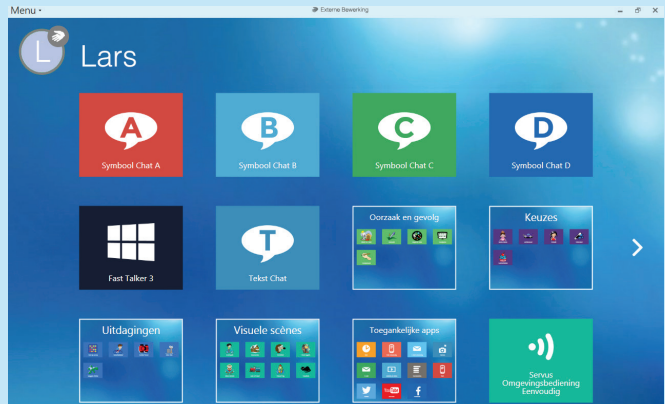

Paginaset gebruiken

Gebruik van een paginaset is makkelijk en intuïtief. Elke paginaset ziet er en beetje anders uit. Hier gebruiken we een pagina uit Symbool Chat A om de basisprincipes te tonen.

De grote cel bovenaan is de **Werkruimte**. Dit is waar een bericht opgesteld wordt. Afhankelijk van de instellingen wordt het bericht uitgesproken of de cursor verplaatst als men op deze cel klikt.

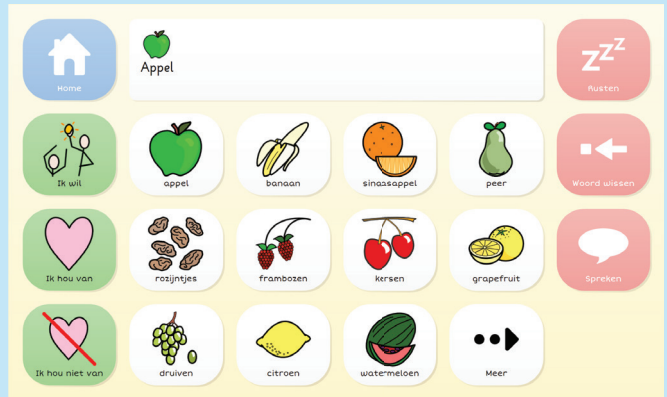

De groene cellen zijn het begin van de zin. De witte cellen zijn Woordenlijst-cellen. Zowel de groene als de witte cellen plaatsen tekst in de werkruimte om een bericht op te stellen. In ons voorbeeld is er meer woordenschat beschikbaar dan op één pagina kan passen – klik op **Meer** om andere woorden te zien.

De rode cellen zijn **Commando**-cellen die speciale functies uitvoeren. De cel **Rusten** in de hoek zal de autoklik voor oogbesturing- en hoofdmuisgebruikers pauzeren – Klik er nogmaals op om te hervatten.

Link-cellen worden gebruikt om naar andere pagina's te gaan. In dit geval kunt u naar de 1ste pagina gaan, door op **Home** te klikken.

★ Tip

Om snel te vinden op welke pagina een woord staat, klik eerst op de menubalk en dan op **Woord zoeken**.

Het is snel en makkelijk om kleine wijzigingen aan een cel of pagina aan te brengen. Hier tonen we hoe een cel aan te passen en hoe een woord snel aan een pagina toe te voegen.

De label of foto wijzigen

Klik op de menubalk en dan **Bewerken** (of druk op F11 op uw toetsenbord). Selecteer de te wijzigen cel door er op te klikken.




Nu kunt u de tekst die in de cel verschijnt wijzigen door op **Label Wijzigen** te klikken, of selecteer een andere foto. Klik op **Bewerken Beëindigen** om de wijzigingen op te slaan.

Voor meer informatie over het bewerken van cellen zie **Les 1.1** en **1.2**.

Een woordenlijst uitbreiden

Als op uw pagina een woordenlijst gebruikt wordt, kunt u snel een woord toevoegen door op de menubalk en dan op **Woordenlijst** te klikken. Klik op **Toevoegen**, typ een nieuw woord in, selecteer een foto en klik op **OK**. Voor meer info over **Woordenlijsten**, zie **Les 2.1**.

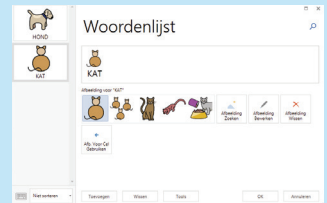


★ Tip

U kunt een schermtoetsenbord openen door linksonder op het icoontje te klikken.

Openen bij opstart

Misschien wenst u dat Grid 3 automatisch opent als de computer opgestart wordt.

Klik op de menubalk en dan op **Instellingen**, **Computer** en **Grid 3 samen met Windows opstarten**.

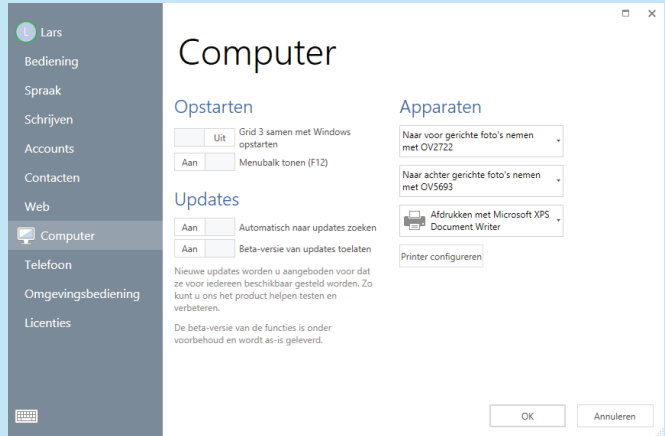


★ Tip

Instellingen om Grid 3 de camera en printer te laten gebruiken staan ook hier.

De startpaginaset bepalen

Om te bepalen welke paginaset geopend moet worden als Grid 3 opgestart is, wees zeker dat de **Hoofdgebruiker** geselecteerd is en klik dan op de menubalk, **Instellingen** en dan helemaal bovenaan op de naam van de gebruiker. Onder **Opstarten** klik op het uitklapmenu en kies uit de beschikbare paginaseten of de Grid Verkenner.

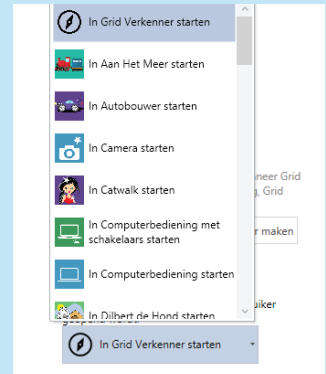

A series of horizontal dotted lines for taking notes.

Zet uw Grid 3 reis verder op
thinksmartbox.com

Smartbox