




Son interface rend l'utilisation du Roger Touchscreen Mic simple et intuitive en classe et permet à l'enseignant et aux élèves de savoir à tout moment si le microphone fonctionne. La voix de l'enseignant ou du parent est entendue directement dans les oreilles, en particulier dans un environnement bruyant. Les activités pédagogiques en petits groupes deviennent alors accessibles pour tous les enfants.

## Description

- 1 Marche/Arrêt
- 2 Activation/Veille
- 3 Témoin lumineux
- 4 Microphones
- 5 Sourdine
- 6 Écran tactile
- 7 Port micro USB
- 8 Prise jack 3,5 mm/1/8"
- 9 Pieds
- 10 Cordon : bouton de fixation/retrait
- 11 Clip du cordon
- 12 Dispositif de réglage de la longueur du cordon
- 13 Dispositif d'ouverture de sécurité

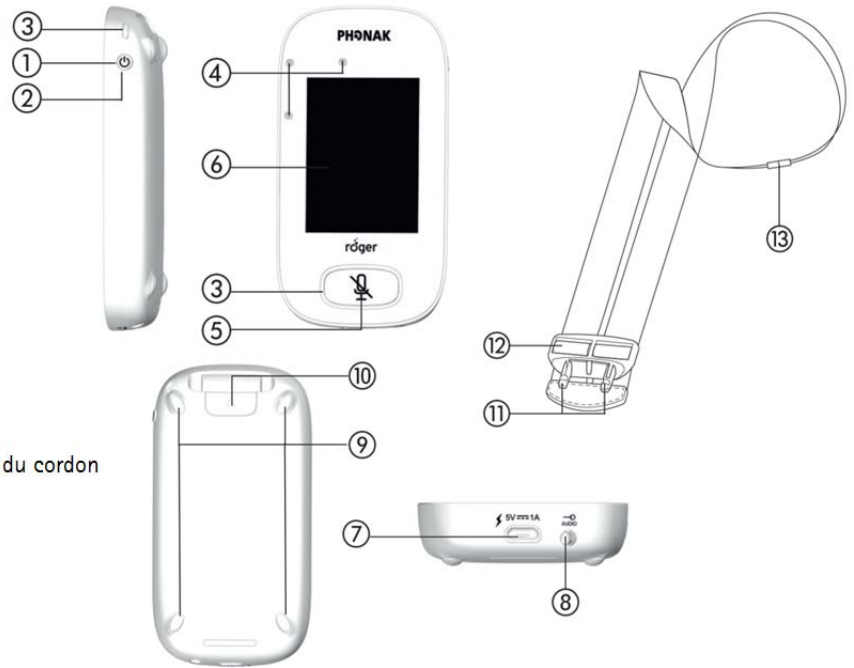

## Fonctions

### Utilisation

- Écran tactile
- Icônes intuitives pour un accès rapide aux fonctions de Roger
- Technologie de défilement facile pour parcourir le menu
- Témoins lumineux
- Boutons Marche/Arrêt et Sourdine facilement repérables

### 3 microphones

- Modes de microphones automatiques (automatique, petit groupe, interview, cordon)
- Système de trois microphones intelligents intégrés pour les activités en petit groupe.

### Réseau MultiTalker

- Microphones pour l'enseignant
- Microphones à main pour les élèves
- Hub multimédia Roger

## Informations générales

Dimensions (L x l x H) :	104 x 55 x 16 mm
Poids :	94 g
Couleur :	Champagne/Noir
Conditions de fonctionnement :	0 °C à +45 °C et humidité relative < 95 % (sans condensation)
Conditions de transport et de stockage :	-20 °C à +60 °C et humidité relative de 90 % pendant une période prolongée



## Informations sur la puissance et la pile

Pile :	Lithium-polymère 3,7 V CC
Durée de la recharge :	Environ 2 heures. La durée de la recharge dépend de l'état de la pile
Capacité :	1 200 mAh
Durée de fonctionnement :	Environ 10 heures La durée de fonctionnement restante est indiquée dans la barre d'état
Prise de recharge :	Entrée : 100 - 240 V Sortie : 5 VCC/1 A Connecteur : port micro USB Longueur du câble : 1,3 m (chargement ou connexion à un ordinateur pour mise à jour ou maintenance)  La pile ne peut pas être surchargée. L'appareil peut chauffer pendant la recharge.  Remarque importante : il est recommandé de n'utiliser que le chargeur Phonak d'origine.

## Informations concernant les microphones

Nombre de micro :	3 microphones intégrés
Type :	Réseau de 3 microphones
Mode :	Automatique, petit groupe, interview, cordon
Accéléromètre :	Détecte et contrôle la position du microphone, ce qui lui permet alors d'activer automatiquement le mode de microphone approprié.

## Informations concernant l'interface utilisateur

Écran tactile :	Écran tactile couleur 6,1 cm. Interface utilisateur pour activer/désactiver les fonctions
Option de port :	Cordon porté autour du cou
Cordon :	- Clip pour attacher ou détacher l'appareil du cordon - Clip pour régler la longueur du cordon et placer l'appareil à 20 cm de la bouche de l'orateur - Dispositif d'ouverture de sécurité

## Informations audio

Entrée et sortie audio :	Filaire (jack 3,5 mm)
Largeur de bande audio :	100 Hz à 7,3 kHz

## Informations concernant Roger

Roger :	Roger est le nouveau standard numérique qui comble le manque de compréhension dans le bruit et à distance, en transmettant sans fil la voix du locuteur directement à l'auditeur.
Technologie de transmission :	2,4 GHz incluant le saut de fréquence automatique adaptatif
Émission de puissance :	100 mW
Portée de fonctionnement du récepteur Roger :	20 m
Portée de fonctionnement pour les fonctions Connect :	10 cm

## Compatibilité avec les appareils Roger

Récepteurs Roger compatibles :	Tous les récepteurs Roger
Nombre de récepteurs Roger en utilisation dans un réseau Roger :	Illimité
Microphones Roger compatibles :	Roger Touchscreen Mic, microphone à main Roger, Roger inspiro®, Roger DynaMic®  * certaines des nouvelles fonctions du Roger Touchscreen Mic peuvent ne pas être disponibles pour les micros Roger précédents Jusqu'à 35
Nombre de microphones Roger en utilisation dans un réseau Roger :	Hub multimédia Roger Roger inspiro AudioHub®  * certaines des nouvelles fonctions du Roger Touchscreen Mic peuvent ne pas être disponibles avec le hub Roger précédent 1 hub multimédia Roger
Hub Roger compatible :	Roger DigiMaster 5000, Roger DigiMaster 7000, Roger DigiMaster X (version logicielle 4.x ou ultérieure)
Nombre de hub Roger en utilisation dans un réseau Roger :	1 Roger DigiMaster 5000 2 Roger DigiMaster 7000 5 Roger DigiMaster X
Roger SoundField compatible :	Roger WallPilot
Nombre de Roger SoundField en utilisation dans un réseau Roger :	
Roger WallPilot compatible :	

## Accessoires

Support de chargement (L x l x H) :	188 x 75 x 28 mm Design à 4 fentes pour charger jusqu'à 4 appareils simultanément. Compatible avec le Roger Touchscreen Mic, le microphone à main Roger, le hub multimédia Roger.
Étui de transport :	Conçu pour le Roger Touchscreen Mic
Microphone de tête :	Microphone de tête pour le Roger Touchscreen Mic.
Clip pour ceinture :	Clip pour ceinture pour le Roger Touchscreen Mic.
Adaptateur électrique :	GB, AUS

## Normes appliquées

Sécurité électrique :	CEI/EN 60950-1
Radiocom 2,4 GHz :	EN 300 328
CEM :	EN 301.489-1,-3,-9,-17
TAS (2,4 GHz)	EN 62209-2 TAS 1 g = 0,10 W/kg TAS 10 g = 0,05 W/kg