

## LightWriter SL50

### Pour quels types de handicap ?

---

**Lightwriter SL50** est une aide à la communication textuelle dédiée aux personnes **dépourvues de la parole**, cherchant un appareil/une machine pour communiquer, parler, s'exprimer, échanger avec leur entourage et l'extérieur.



**Lightwriter SL50** a été conçu pour un usage sur table, lit ou fauteuil roulant. Une housse de transport permet d'avoir l'appareil toujours avec soi et contrairement à un ordinateur, le **démarrage et l'arrêt de l'appareil se font instantanément** pour que vous soyez toujours prêt à communiquer.

**Lightwriter SL50** dispose de voix **A CAPPELLA masculine et féminine** de très bonne qualité, vous pourrez régler leur vitesse d'élocution ainsi que la façon dont elles doivent agir : à la fin de chaque mot, phrase etc...

**Lightwriter SL50** fonctionne sur **batterie rechargeable longue durée** qui vous permet de communiquer pendant une journée entière.

**Lightwriter SL50** peut se connecter à votre smartphone en bluetooth et donc être utilisé pour envoyer et recevoir des sms, passer et recevoir des appels téléphoniques. Les voix a cappella se chargent alors de parler à votre place à votre interlocuteur lorsque vous saisissez du texte ou alors le micro intégré peut transmettre le son d'une personne qui intervient dans la conversation à vos côtés.



# Pourquoi LighterWriter SL 50 ?

---

## Accessibilité

- Par clavier mécanique. Les différents réglages permettent d'influencer sur les temps d'appui, de répétition, afin d'adapter réellement l'appareil aux capacités physiques de la personne. A noter que l'accès aux réglages se fait très facilement et rapidement grâce à des raccourcis de touches.
- 3 types de guides doigts sont fournis avec Lightwriter SL50, pour avoir des touches « enfoncées », « rasantes ou « sortantes ».
- Il est possible de monter le clavier en format AZERTY ou ALPHABETIQUE. Aussi les touches de fonctions « essentielles » peuvent être placées à droite ou à gauche de l'appareil en fonction des capacités de l'utilisateur, surtout dans le cadre d'une hémiplegie.
- Par défilement lumineux et/ou auditif avec un ou deux contacteurs
- 2 écrans (utilisateur + interlocuteur avec possibilité de verrouiller ce dernier)
- Montage possible sur sangle « tour de cou » ou sur support fauteuil roulant (en option)

## Actions

- Aides à la communication par clavier textuel transcrit en voix de synthèse (homme ou femme et paramétrables)
- Smiley vocaux (sons et exclamations, pour une communication encore plus vivante !)
- Accès facilité à des phrases en mémoire, des abréviations pour accélérer la communication
- Prédiction de mots dynamique (mise en mémoire automatique du vocabulaire utilisé et rangement par ordre de fréquence d'utilisation)
  
- Envoi et réception de SMS (uniquement avec smartphone android connecté)
- Emission et réception d'appels GSM (avec smarphone Android ou IOS connecté)

## Caractéristiques

- Réglages simples et facilement accessibles
- Petit boîtier élégant et robuste
- Voix masculine et féminine A CAPPELLA et puissance sonore
- Batterie Li-ion rechargeable longue durée (>8 heures d'utilisation) – temps de charge 4h
- Dimensions : 24cm x 14cm x 5,5cm
- Dimensions du clavier : 21cm x 5,5cm
- Dimensions touches : 1,2cm x 1cm
- Poids : 740gr

## Références

Références	Désignation
7L50	Lightwriter SL50
VMS	Support sur mesure s'adaptant à tout type de fauteuil roulant
7L1730209	Guide Doigts SL50 touches "sorties"
7L1730210	Guide Doigts SL50 touches "enfoncées"
7L1730212	Guide Doigts SL50 touches "à fleur"
7L1730047	Sac de transport et d'utilisation lightwriter SL50
7L1740010	Chargeur lightwriter SL 50
7L1740051	Protection lighwriter SL50 pour utilisation avec touches "à fleur"
7L1740052	Protection lighwriter SL50 pour utilisation avec touches "enfoncées"
SERVICES	Voir fiche assistance et Mise en service Cenomy

### Lightwriter SL50 est livré avec :

- 1 guide de démarrage rapide
- 1 clé USB contenant le manuel utilisateur au format PDF
- 1 Chargeur secteur et allume cigare (voiture)
- 3 différents guides doigts
- Sac de transport avec bandoulière et utilisation possible en laissant lightwriter dans le sac
- Tournevis pour changer les guides doigts
- 2 contacteurs « click »
- 1 câble ethernet pour mettre à jour votre lightwriter.
- Des touches claviers de rechange



# Accompagnement

---

Par la société Cenomy ou son réseau de prestataires qualifiés, nous vous proposons plusieurs services pour vous accompagner dans un projet durable :

- Experts depuis plus de 30 ans
- Installation/mise en service
- Assistance technique Premium
- Formation spécifique

## Assistance technique

---

CENOMY issue de Proteor Aides Electroniques est un fournisseur de solutions depuis 1984 : acteur national et international pour le développement des technologies au service de l'indépendance et de l'autonomie des personnes en situation du handicap. Bien que les technologies évoluent il est essentiel de les maîtriser, de les comprendre et de les rendre « utiles et fonctionnelles ». Pour cela CENOMY propose un service d'assistance Premium pour accompagner les utilisateurs et les aidants à l'utilisation quotidienne de ces technologies. Découvrez les services proposés par l'Assistance Premium sur notre site internet.

## Contacts et renseignements

---



info@cenomy.com



03 80 78 42 20

[Formulaire de demande d'évaluation](#) sur notre site internet dans la rubrique « contactez-nous »

## Assistance technique

---

Présentez votre numéro client à l'appel ou dans votre mail



support@cenomy.com



03 80 78 42 49

[Formulaire de prise en charge SAV](#) sur notre site internet dans la rubrique « SAV »

**Retrouvez toute notre actualité sur :**  
**[www.cenomy.fr](http://www.cenomy.fr)**



[www.cenomy.fr](http://www.cenomy.fr)