



# SMS Flasher MF17

## MODE D'EMPLOI

Spécialement conçu pour les sourds et malentendants





Tous vos produits sont déjà  
connectés entre eux

# Sommaire :

- 4** : Contenu de votre colis
- 5-10** : SMS Flasher MF17


# Contenu de votre colis



(A)



(B)

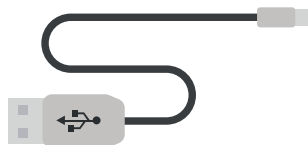


(C)



(D)

- (A) - SMS Flasher MF17
- (B) - Port de connexion Son
- (C) - Port de connexion USB
- (D) - Mode d'emploi

# SMS Flasher MF17

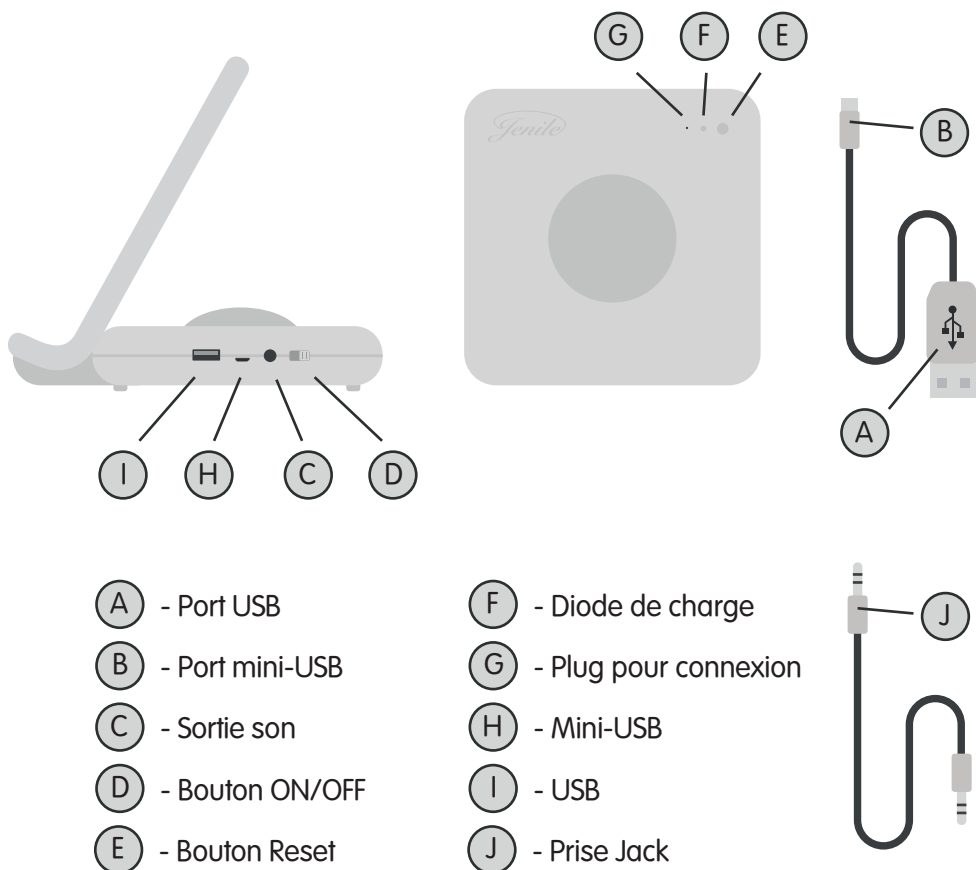

## Caractéristiques techniques

Dispositif sans fil

Batterie rechargeable

Autonomie : 1 mois

Distance de réception des ondes radio : 100 m


Dimensions : LxHxP : 125x113x100 mm

Poids : 219g


Garantie 2 ans (batterie 1 an)

## Utilisation


Grâce à votre SMS Flasher vous serez avertis de toutes vos réceptions d'appels ou de sms. Sachez que votre SMS Flasher ne peut pas être automatiquement connecté à vos récepteurs Jenile (cube, vibreur ou flash fixe). Le SMS Flasher est équipé d'une batterie rechargeable.

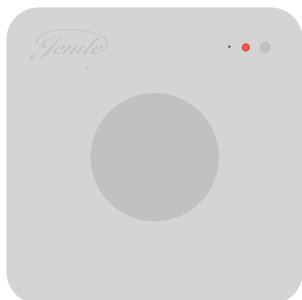

Le LED (F) s'allume en rouge pour vous prévenir que la batterie est faible,

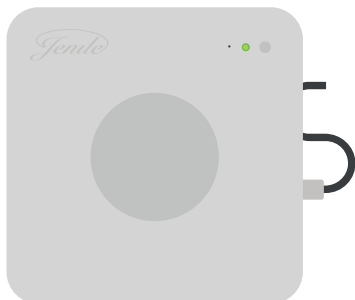


en vert lorsque la batterie se charge.  
Lorsque le LED (F) n'est pas allumé, c'est qu'il est en fonctionnement normal.

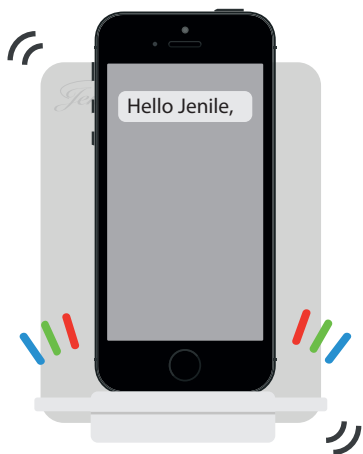

Lorsque vous recevez un appel ou un message, le SMS Flasher s'illumine avec des lumières multicolores pendant 1 minute.



Pour l'éteindre, il suffit de presser le bouton reset (E). Vous indiquez ainsi à votre SMS Flasher que vous avez vu votre message.

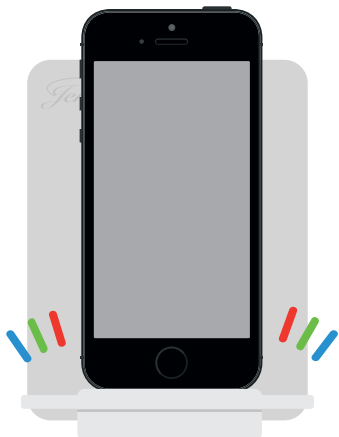


Si vous n'appuyez pas sur le bouton reset, des lumières multicolores continueront à clignoter toutes les 10 secondes pour vous prévenir de l'appel ou du message en attente.




Pressez le bouton reset (E) pour arrêter les lumières clignotantes et prévenir votre SMS Flasher que vous avez vu votre message.

# Réglages


Si vous venez de recevoir le SMS Flasher, il n'est pas connecté avec les produits Jenile que vous possédez déjà. Vous devez donc connecter tous vos produits ensemble pour qu'ils puissent fonctionner correctement. Pour cela suivez attentivement les instructions et munissez-vous de votre cube :

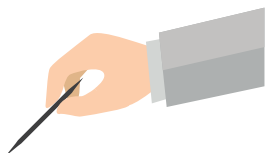

Munissez-vous d'un cure dent

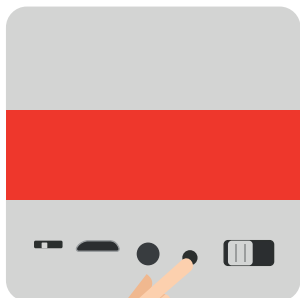


Appuyez sur la touche plug de votre récepteur (le cube, le vibreur de poche, etc.) jusqu'à ce qu'il s'allume en rouge

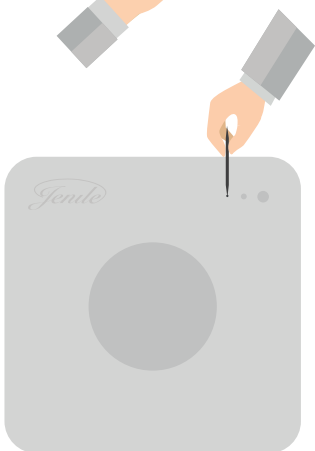


Appuyez immédiatement et rapidement sur la touche plug (G) du SMS Flasher avec le cure dent




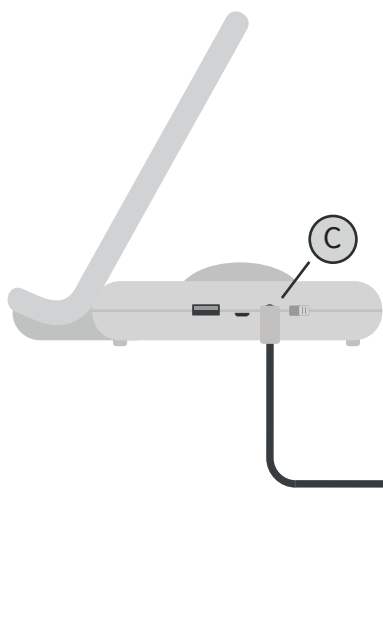

Assurez-vous bien que vous ayez réussi la connexion, en branchant la prise jack (J) à la sortie son (C) de votre SMS Flasher.

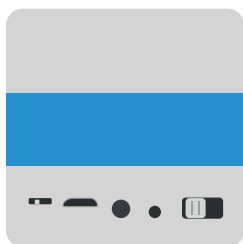

Lorsque votre SMS Flasher s'allume, le cube doit s'allumer en bleu au même moment. Si ce n'est pas le cas, répétez l'opération.

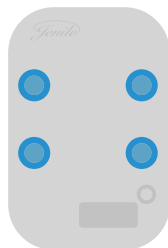

# Tests

Une fois votre SMS Flasher connecté à vos récepteurs Jenile, vous devez tester son bon fonctionnement avec votre téléphone.


Vous avez 2 possibilités d'utilisation.

## 1. Utilisation en mode vibreur :

- 1 Mettez votre téléphone portable en mode vibreur.
- 2 Placez-le ensuite sur votre SMS Flasher de sorte à ce qu'il soit bien posé sur l'encoche (K).
- 3 Faites vibrer votre téléphone : votre SMS Flasher ainsi que tous vos récepteurs Jenile doivent s'illuminer.

## 2. Utilisation en mode son :

- 1 Mettez votre téléphone portable en mode sonnerie.
- 2 Branchez votre prise Jack (J) à la sortie son de votre téléphone et l'autre embout (J) à la prise audio (C) de votre SMS Flasher.

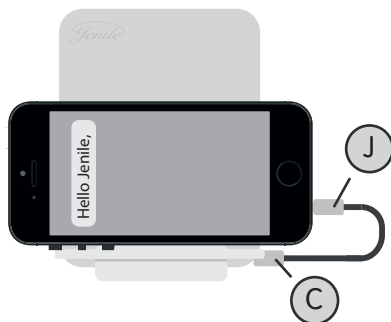

- 3 Faites sonner votre téléphone : votre SMS Flasher ainsi que tous vos récepteurs Jenile doivent s'illuminer.

Si l'utilisation en mode vibreur (utilisation n1) ne fonctionne pas, et que votre SMS Flasher ne s'illumine pas à la réception d'un SMS ou appel : c'est que votre vibreur n'est pas assez puissant. Dans ce cas, pas d'inquiétudes, vous pouvez utiliser votre SMS Flasher en mode son (utilisation n2), pour 100% de satisfaction.



[www.jenile.com](http://www.jenile.com)

